

**Bitte beachten Sie, dass die elektrische Vernebler-Einheit ein Verschleißteil ist.
Bitte reinigen Sie dieses nach jeder Anwendung!**

INFO: NEUE MISCHUNG-ANGABEN AUFGRUND NEUER ERFAHRUNGEN - SIEHE UNTEN

ACHTUNG: Verwenden Sie grundsätzlich...

keine Medikamente und Mittel auf Pulverbasis oder die Jod bzw. Bor enthalten,
kein aktiviertes oder ionisiertes Wasser

keine Medikamente mit Chlorverbindungen, wie z.B. Chlorocresol, kein colloidales Silber oder Lösungen mit selbigem

HINWEIS: Hypertone Kochsalz- oder Emser Salzlösungen bedingen eine gewissenhafte Reinigung und können unter Umständen zur verringerten Lebensdauer des elektrischen Verneblers führen. Gleiches gilt, wenn Medikamente nicht wie empfohlen gemischt werden.

MUCOSOLVAN: Verwenden Sie bitte „Injekt“ und nicht „Inhalat“. In einzelnen Fällen war das Inhalat zähflüssiger.

Auswahl an Medikamenten, die bereits erfolgreich mit FlexinebTM vernebelt wurden. Die Auswahl stellt keine Produktwertung dar! Ihr Tierarzt und nur er/sie entscheidet, welche Medikamente zur Anwendung kommen sollen.

Antibiotika

Wirkstoff	Mögl. internationale Markennamen	Wirkstoffgruppe	Mischung mit Kochsalzlösung	Anhaltswert / Durchschnitt bei Verneblung in Verbindung mit 1ml Kochsalzlösung (0,9%) - gesamt 2ml
Cefquinom	u.a. Cobactan	Cephalosporin	1:1 (Anteile)	3,5 Minuten
Ceftiofur Natrium	u.a. Excenel (hier ausschliesslich die Injektionslösung zum Anrühren verwenden in Verbindung mit einem spez. Vernebler (grün, schnell - Einzelbestellung aus Irland). Nicht Excenel Flow!! verwenden	Cephalosporin	1:1 (Anteile)	3,5 Minuten
Gentamicin	u.a. Gentaject, Gentocin, Gentamax	Aminoglycosidan	1:1 (Anteile)	3 Minuten

Bronchodilatoren

Wirkstoff	Mögl. internationale Markennamen	Wirkstoffgruppe	Mischung mit Kochsalzlösung	Erfahrungswert / Durchschnitt bei Verneblung in Verbindung mit 1ml
-----------	----------------------------------	-----------------	-----------------------------	--

				Kochsalzlösung (0,9%) - gesamt 2ml
Ipratropium	u.a. Atrovent, Aerovent Narilet, Atronase, Ipratropiumbromid	Anticholinergikum	1:1 (Anteile)	2 Minuten
Salbutamol (Albuterol)	u.a. Ventolin, Proventil, Torpax, Volmax	β2- Sympathomimetikum	1:1 (Anteile)	2 Minuten
u.a. Ipratropiumbromid, Fenoterolhydrobromid	Berodualin	β2- Sympathomimetikum	1:1 (Anteile)	2,5 Minuten
Clenbuterol	u.a. Ventipulmin, Broncodil, Planipart, Spiropent	β2- Sympathomimetikum	1:1 (Anteile)	2,5 Minuten
Corticosteroide				
Wirkstoff	Mögl. internationale Markennamen	Wirkstoffgruppe	Mischung mit Kochsalzlösung	Erfahrungswert / Durchschnitt bei Verneblung in Verbindung mit 1ml Kochsalzlösung (0,9%) - gesamt 2ml
Dexamethason	u.a. Dexamethason (Bela Pharm), Hexamethason	Cortison	1:1 (Anteile)	3 Minuten
Fluticason Propionat	u.a. Flixotide, Flovent Flonase	Cortison	1:1 (Anteile)	2,5 Minuten
Budesonid	u.a. Pulmicort, Rhinocort Entocort	Cortison	1:1 (Anteile)	3 Minuten
Mukolytica				
Wirkstoff	Mögl. internationale Markennamen	Wirkstoffgruppe	Mischung mit Kochsalzlösung	Erfahrungswert / Durchschnitt bei Verneblung in Verbindung mit 1ml Kochsalzlösung (0,9%) - gesamt 2ml
Acetylcystein (ACC)	u.a. Parvolex, Acemuc, Fluimucil	Mucolytic	1:1 (Anteile)	3,5 Minuten
Ambroxolhydrochlorid	u.a. Mucosolvan (Injekt)		1:1 (Anteile)	3,5 Minuten

Weiteres				
				Erfahrungswert / Durchschnitt bei Verneblung in Verbindung mit 1ml Kochsalzlösung (0,9%) - gesamt 2ml - bzw. wenn unverdünnt.
isotonische und hypertonische Kochsalzlösung	NaCl Lösung - fertig gemischt. Keine Selbstanmischung!	NaCl		2-2,5 Minuten
Emser Inhalationslösung	Inhalationslösung - fertig gemischt in Ampullen. Keine Selbstanmischung	Emser Salz, gereinigtes Wasser		2,5 Minuten
Chelated Silber	u.a. Silva Plex (Inhalat für Tiere)	Chelated Silber, destilliertes Wasser		2 Minuten
Balsamic Air	u.a. Audevard Balsamic Air (Inhalat)	u.a. ätherische Öle, pflanzliche Substanzen	1:1	3,5 Minuten
Chromohexal	Inhalationslösung		1:1	2,5 Minuten

Stand 22.06.16 – Den aktuellen Status der Übersicht finden Sie unter dem Link

<https://www.ihr-produkt.de/inhalatoren-fuer-pferde/informationen/medikamente/>

oder sprechen Sie uns an. Sie erreichen uns unter der Rufnummer +49 6078 9176702 oder unter kontakt@ihr-produkt.de